

歯ぐきケア 3つのポイント


1 “歯ぐきの中”を意識する

全身の健康に影響する細菌は、歯ぐきの中にひそんでいます。しっかりかき出しましょう！



2 中指の第一関節に巻く

中指に巻くことで、人差し指と親指が自由に動かせます。前歯も奥歯も歯ぐきケアがスムーズに。

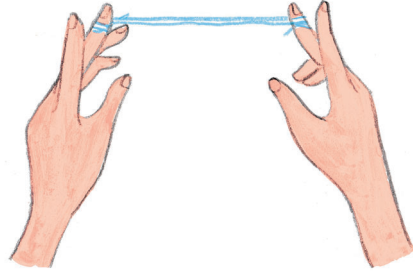

3 常に清潔な部分を使う


一度通したフロスは細菌がウジャウジャ。使うたびに指で巻き取り、常に新しい部分で歯ぐきケアをしましょう。



フロスの詳しい使い方は、動画をチェック！
<https://fluorfloss.jp/>



『フロアフロス』は、ここが違う！

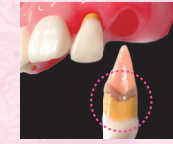

384本の糸がゴツソリ絡め取る
歯ぐきの中の細菌を取り逃しません。



歯ぐきの中に入れても痛くない
摩擦や唾液でフワッと広がる、歯ぐきにやさしい仕様です。



歯ぐきケアのために開発された
イタリアのフロス研究の第一人者が開発に携わっています。



今日の歯ぐきケアが、明るい未来をつくる

歳を重ねても、楽しい毎日過ごしたいもの。そのためにも欠かせないのが、フロスを使った歯ぐきケアです。歯ブラシではケアできない「歯と歯のあいだ」や「歯ぐきの中」にひそむ細菌を、1日1回取り除く。それが今だけでなく、この先の健康を守ることに繋がります。『フロアフロス』で、イキイキとした未来をつくりませんか。

fluorfloss

選べるラインナップ

ワックス付き・made in ITALY

思いっきり使える！
フロアフロス
250m



ケースを繰り返し使える！
詰め替え用
250m



持ち運びに便利！
フロアフロス
45m



『フロアフロス』は、歯周病予防のために作られました。

株式会社オーラルケア 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9
FreeDial: 0120-500-418

●無断での複写・複製・転載はお断りします。Copyright©2021. OralCare All Rights Reserved.

「歯を守る」口腔ケア推進のパートナー
Oral Care
sm2109

“歯ぐきケア”で未来をもっとHappyに！



fluorfloss

歯ぐきの健康のために どうして『フロアフロス』が いいの？


1 歯ぐきの中の細菌が
ごっそり取れる！



384本*の繊維一本いっぽんに、ちりちりうねる“アフロ加工”！ 歯ぐきの中の細菌がしっかり絡みついてきます。しかも世界屈指のファッションと職人の国、イタリア・ミラノ産。高品質で丈夫な素材だからお掃除中に切れません。


*384本は、細菌の除去率を徹底的に追求して編み出された本数です。

2 歯ぐきにあたっても
痛くない！

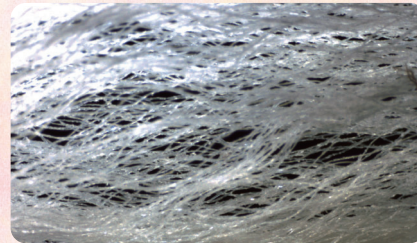

多すぎず少なすぎないワックスのつき具合。歯と歯の間に入れるときの摩擦で、繊維がフワッと広がります。一本いっぽんがやさしくうねっているのです、歯ぐきにあたって痛くありません。

3 フロス研究第一人者のお墨付き

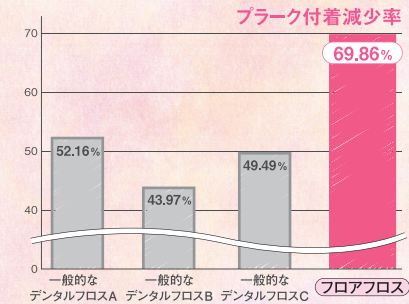

フロス研究の第一人者であるイタリア・ジェノバ大学のアンナマリア教授が、汚れの落ち具合を確認済み！「歯ぐきケアに最適なフロス」と推奨しています。

歯周病を予防するには、歯ぐきの中の細菌を取り除くことが大切。
『フロアフロス』は“よく取れて、痛くない”歯ぐきケア専用のデンタルフロスです。

